


## Anleitung zum Softwareupdate am EDAN i15VET

1. Gehen Sie auf unsere Homepage und laden Sie sich die EDAN i15Vet-Updateordner (zip-komprimierter Ordner **i15Vet main1.27+analog1.77.7z**) unter folgendem Link herunter:

<https://www.scilvet.de/downloads>

2. Entpacken Sie den zip-Ordner, wie folgt im Beispiel:

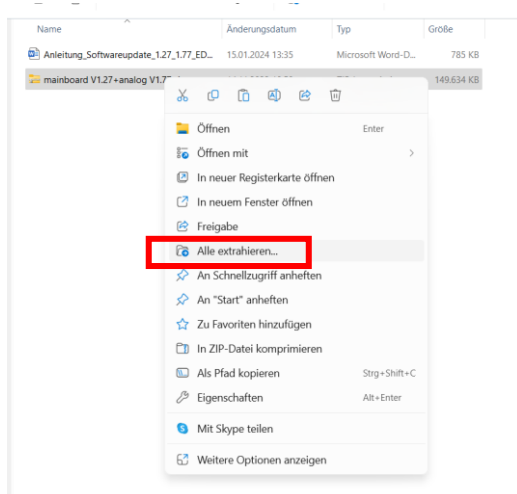

3. Kopieren Sie nun die im o.g. Updateordner enthaltenen Ordner „**target**“ und „**target\_vet**“ auf einen leeren USB-Stick

| Name       | Änderungsdatum   | Typ         | Größe |
|------------|------------------|-------------|-------|
| target     | 15.01.2024 13:54 | Dateiordner |       |
| target_vet | 15.01.2024 13:54 | Dateiordner |       |

4. Stecken Sie den USB-Stick in einen freien Slot des EDAN und schalten Sie das Gerät ein
5. Das Update wird automatisch installiert (schwarzer Bildschirm).
6. Sobald das Update abgeschlossen ist, erscheint die Anmeldemaske im Display. Bitte warten Sie, bis das Update vollständig abgeschlossen ist.
7. Melden Sie sich im Servicemodus an:

a. Benutzername: service



- b. Passwort: 8008307573
8. Wählen Sie den Menüpunkt „**Setup**“ aus.
9. Wählen Sie den Menüpunkt „**Diagnostik**“ aus.
10. Wählen Sie den Punkt „**Analog-Aktual**“ aus und bestätigen Sie mit OK.
11. Das Analog-Update startet automatisch.
12. Nach Abschluss des Updates schaltet sich das Gerät automatisch aus.
13. Entfernen Sie bitte den USB-Stick.
14. Schalten Sie das Gerät an.
15. Melden Sie sich im Service-Modus an:
  - a. Benutzername: service
  - b. Passwort: 8008307573
16. Wählen Sie den Menüpunkt „**Setup**“ aus.
17. Wählen Sie den Menüpunkt „**Diagnostik**“ aus.
18. Wählen Sie den Punkt „**Analogplatine**“ aus und überprüfen Sie, ob die aktuelle Softwareversion **V1.77** angezeigt wird.
19. Wählen Sie den Punkt „**Hauptplatine**“ aus und überprüfen Sie, ob die aktuelle Softwareversion **V1.27** angezeigt wird.
20. Sind beide Version korrekt angezeigt ist das Update erfolgreich installiert und das Gerät kann ausgeschaltet werden.
21. Falls eine abweichende Softwareversion im Gerätedisplay angezeigt wird, kontaktieren Sie bitte den technischen Service der scil animal care company GmbH unter der Telefonnummer:  
06204 7890221.