


# Software Update scil vCell 5

Es wird ein USB-Stick mit mindestens 50MB Speicherplatz benötigt.


Das Paket ist in einer .zip Datei. enthalten.

Laden Sie das Software Paket herunter. Ziehen Sie die heruntergeladene Datei auf einen USB-Stick. Stellen Sie sicher, dass 1. die Ordnerstruktur beibehalten wird und 2. der Ordner ("Nektar") sich im Stammverzeichnis des USB-Sticks befindet.

Die Datei sollte sich wie folgt auf dem USB-Stick befinden.

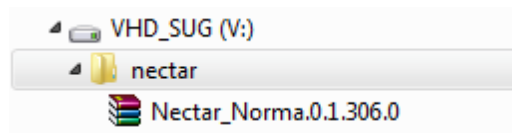

Stecken Sie den USB-Stick in einen freien USB Anschluss auf der Rückseite des Analyzers.

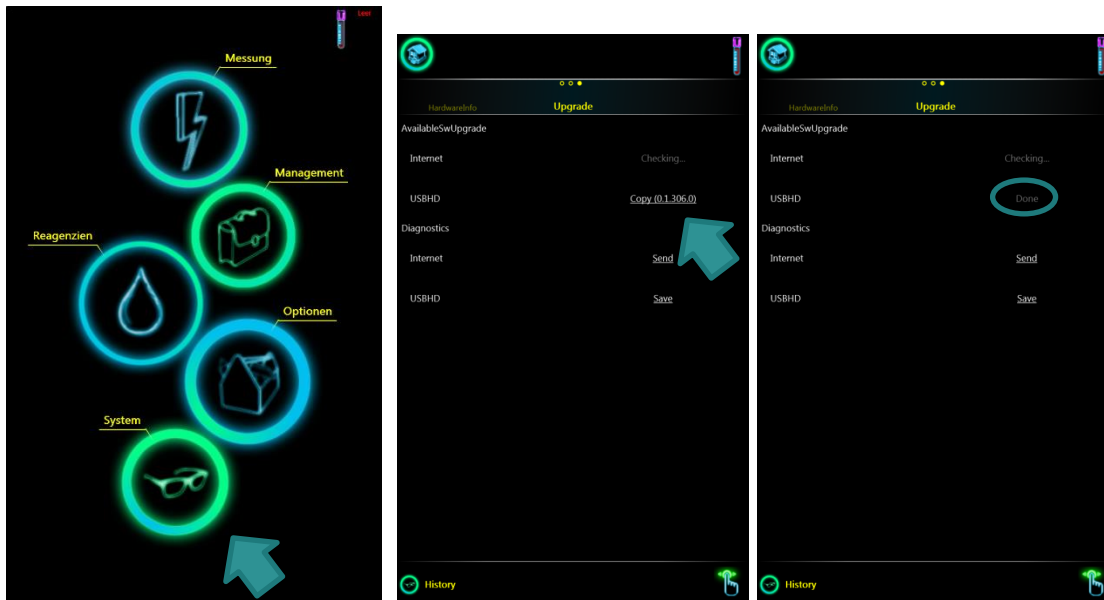

Analyzer anschalten. Tippen Sie auf das Menü „System“.

Tippen Sie auf „Geräteinformation“

Wischen Sie nach links zu „Upgrade“ (3. Seite).


Die Software wird anzeigen, dass ein USB Upgrade verfügbar ist. („Copy 1.0.503.0“).

Tippen Sie auf „Copy...“.

Die Software wird das neue Software Paket auf den Analyzer kopieren. Wenn der Vorgang beendet ist, wird die Nachricht „Copy...“ sich zu „Fertig“ ändern und nicht mehr zugänglich sein.



Schalten Sie das Gerät aus und an, indem Sie den START Knopf für 4-5 Sekunden gedrückt halten, bis der Analyzer ausgeht. Drücken Sie den START Knopf erneut, um es anzuschalten.

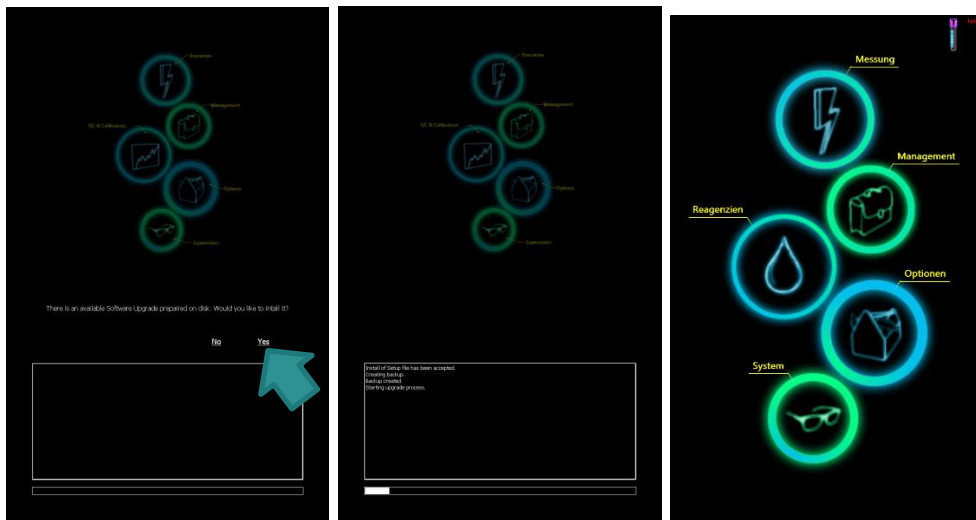

Die Installation benötigt Ihre Bestätigung. Tippen Sie auf „Ja“. Ein Sicherheitsbackup wird erstellt und die Installation wird fortgeführt. Der Prozess wird innerhalb einer Minute beendet. Falls während dem Upgrade ein Fehler war, wird der Analyzer zur alten Software zurückkehren. Die Daten gehen nicht verloren.

Nach einem erfolgreichen Upgrade, wird der Analyzer automatisch neu starten und das Hauptmenü wird erscheinen. Sie können das erfolgreiche Upgrade bestätigen, indem Sie die Software Version über „System – Geräteinformation – Produktinformation“ überprüfen.

