


# Anbindung des VetScan VS2™ an Ihre Praxissoftware „VetInf“




## VetScan VS2™ an den PC anschließen


1. Gerät über USB an den PC anschließen und einschalten
2. Auf den Desktop mit rechter Maustaste „**Computer / Arbeitsplatz**“ anwählen

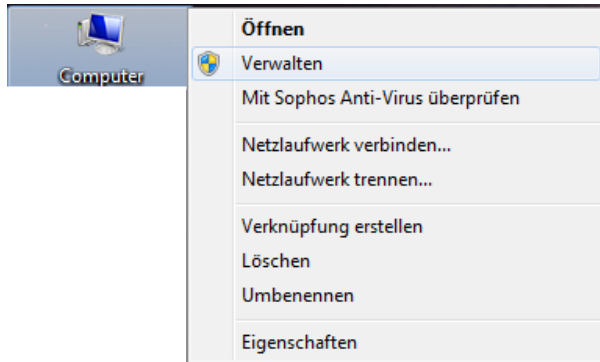

3. „**Verwalten**“ anklicken, folgendes Fenster öffnet sich:

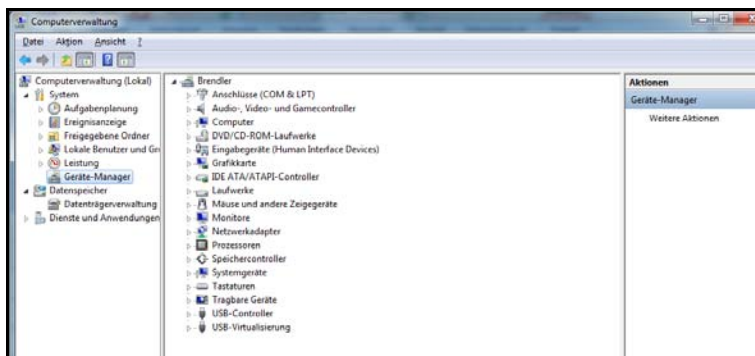

4. „**Geräte-Manager**“ in linker Spalte anwählen und „**Anschlüsse (COM & LPT)**“ öffnen

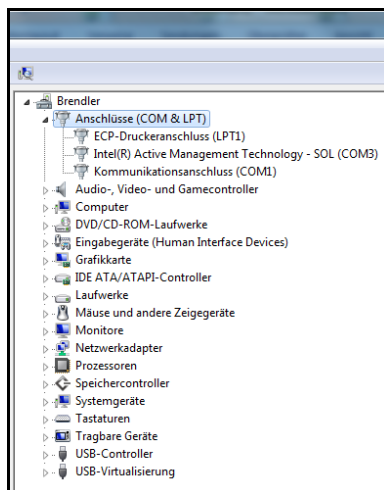

# Anbindung des VetScan VS2™ an Ihre Praxissoftware „VetInf“



5. Gerät ist bezeichnet als „**Abaxis blood chemistry Analyser**“ in der Klammer steht der COM-Port (COM X)
6. diese Nummer des COM-Ports merken
7. VetInf öffnen
8. Menüleiste „**Extras**“ und dann „**Diagnosegeräte**“ anklicken
9. Registerblatt „**VetScan VS2**“ auswählen
10. Haken bei „VetScan VS2“ und bei „3 Sekunden“
11. Entsprechenden „**COM**“; „**9600**“ ; „**8**“ ; „**Keine**“ ; „**1**“ ; „**Kein**“ auswählen mit „**OK**“ bestätigen

Das VetScan VS2™ ist jetzt an VetInf angebunden.

