

PocketChem UA PU-4010

Kurzbedienungsanleitung

Der PocketChem UA PU-4010 überzeugt durch eine präzise und standardisierte Urinanalyse innerhalb von nur 60 Sekunden.

Schritt 1:

Der PocketChem UA PU-4010 überzeugt durch eine präzise und standardisierte Urinanalyse innerhalb von nur 60 Sekunden.

Schritt 2:

Tauchen Sie den Urinstreifen 2 Sekunden während des Signaltons in die Urinprobe ein.

Schritt 3:

Legen Sie den Urinstreifen in den PocketChem UA PU-4010 ein. Nach nur 60 Sekunden können Sie die Resultate im Display ablesen. Optional können Sie die Messergebnisse auch über einen Thermodrucker ausdrucken.



scil animal care company GmbH
Dina-Weissmann-Allee 6
D-68519 Viernheim
Tel.: +49 (0) 6204 78 90 0
Fax: +49 (0) 6204 78 90 200
E-Mail: info@scilvet.com
www.scilvet.com

