

SPOTCHEM™ EZ VET

Kurzbedienungsanleitung

Das SPOTCHEM™ EZ VET ist einfach zu bedienen - in nur drei Schritten gelangt man zum Ergebnis. Der Start der Analyse bedarf nur weniger Handgriffe, danach arbeitet das Gerät die Proben vollautomatisch ab.

Schritt 1:



250 µl Vollblut werden in ein Zentrifugengefäß gefüllt. Das gefüllte Gefäß wird in die Halterung auf dem Probenblett eingehängt und eine Pipettenspitze in die dafür vorgesehene Vertiefung platziert. Während der Analyse zentrifugiert das SPOTCHEM™ EZ VET die Probe ab und pipettiert anschließend das so gewonnene Plasma automatisch auf die Reagenzienstreifen auf.

Schritt 2:



In die dafür vorgesehenen Vertiefungen auf dem Probenblett werden die Teststreifen eingelegt. Mit einem einzigen Knopfdruck wird die Analyse gestartet. Für die Analyse kann zwischen sieben verschiedenen Multiparameter-Streifen gewählt werden, die zusätzlich mit bis zu 3 verschiedenen Einzelparameterstreifen ergänzt werden können. So ist es möglich bis zu 9 Parameter gleichzeitig oder aber auch nur einen einzelnen Parameter zu messen.

Schritt 3:



Nach nur 8 bis 14 Minuten druckt das SPOTCHEM™ EZ Vet die Ergebnisse automatisch aus und zeigt sie im Display an. Auf Wunsch ist eine automatische Übertragung der Analyseergebnisse direkt in Ihre Praxissoftware möglich.



scil animal care company GmbH
Dina-Weissmann-Allee 6
D-68519 Viernheim
Tel.: +49 (0) 6204 78 90 0
Fax: +49 (0) 6204 78 90 200
E-Mail: info@scilvet.com
www.scilvet.com

