

VetScan VS2™

Kurzbedienungsanleitung

In nur drei Schritten kommen Sie einfach und sicher zu Ihrem Analyseergebnis. Die eingebaute Qualitätskontrolle überprüft automatisch die Stabilität der Reagenzien sowie die Qualität der eingesetzten Probe.

Schritt 1:



Zum Start der Messung müssen Sie lediglich 100 µl Vollblut in den Rotor einfüllen. Eine aufwändige Probenvorbereitung durch Zentrifugation entfällt. Alle notwendigen Reagenzien befinden sich bereits im Rotor.

Schritt 2:



Legen Sie den befüllten Rotor in die Lade des Analysegerätes ein. Nach dem Drücken der Starttaste schließt das Gerät die Lade automatisch und startet die Analyse. Über den Touchscreen kann die Patientenummer eingegeben werden.

Schritt 3:



Die Analyse dauert ca. 8 Minuten. Das Ergebnis wird ausgedruckt und auf dem Bildschirm angezeigt. Gleichzeitig werden die Daten automatisch in alle gängigen Software-Programme zur Praxisverwaltung übertragen.



scil animal care company GmbH
Dina-Weissmann-Allee 6
D-68519 Viernheim
Tel.: +49 (0) 6204 78 90 0
Fax: +49 (0) 6204 78 90 200
E-Mail: info@scilvet.com
www.scilvet.com

