

scil Vet abc Plus⁺

18 Parameter in 60 Sekunden?

1 Tropfen Vollblut und 1 Tastendruck!



scil Vet abc Plus⁺

- Sicherheit in nur 60 Sekunden!

Das scil Vet abc Plus⁺ fertigt aus 10 µl EDTA-Vollblut in nur einer Minute ein vollständiges Blutbild inkl. 4-fach Differenzierung der weißen Blutzellen an. Es liefert Ihnen damit die entscheidenden Informationen für eine sichere Diagnosefindung und eine schnelle Therapieentscheidung.



Das scil Vet abc Plus⁺ bestimmt:

- alle Parameter des kleinen Blutbildes: Erythrozyten, Thrombozyten, Gesamtleukozyten, Hämoglobin und Erythrozyten-Indizes
- für Blutproben von Hunden, Katzen und Pferden außerdem: Lymphozyten, Monozyten, Granulozyten und eosinophile Granulozyten

...ein umfassender Überblick
in nur einer Minute!



Komfortables Reagenzienkonzept!

Das scil Vet abc Plus⁺ arbeitet mit einem praktischen Reagenzienpackkonzept: alle für die Messung benötigten Reagenzien befinden sich in dem kompakten Reagenzienpack, der mit wenigen Handgriffen in das Gerät eingesetzt wird. Verbrauchte Reagenzien werden nach der Messung wieder vom Pack aufgenommen und können auf diese Weise einfach und hygienisch entsorgt werden.

ABX Micros
Specially designed for
ABX Micros ESV 60, ABX Vet abc
scil Vet abc and scil Vet abc Plus



Zuverlässig und akkurat!

Das scil Vet abc Plus+ arbeitet mit der bewährten Impedanztechnik. Jede Zelle wird dabei einzeln gezählt und anhand ihrer Größe einer der verschiedenen Populationen des Blutbildes zugeordnet. In jeden Messzyklus integriert das scil Vet abc Plus+ zusätzlich umfassende Qualitätskontrollen und überprüft dabei den einwandfreien Zustand von Gerät, Reagenzien und Probe. Deshalb können Sie sich auf die Messergebnisse des scil Vet abc Plus+ absolut verlassen.

scil Vet abc Plus+

- in nur drei Schritten zum Ergebnis!

Das scil Vet abc Plus+ ist einfach und intuitiv zu bedienen. Über den Touchscreen wird der Benutzer durch das Menü geführt und gelangt in nur drei Schritten zu einem zuverlässigen und aussagekräftigen Messergebnis:



1.

Tierart auswählen und Patienten-ID eingeben


- 8 vorinstallierte Tierarten
- Eingabe der Patientendaten über Touchscreen
- Speicherung von bis zu 1.000 Patientendatensätzen



2.

EDTA-Vollblut zuführen, Messung starten

- minimales Probenvolumen: nur 10 µl EDTA-Vollblut
- keine Probenvorbereitung notwendig
- vollautomatische Durchführung der Messung

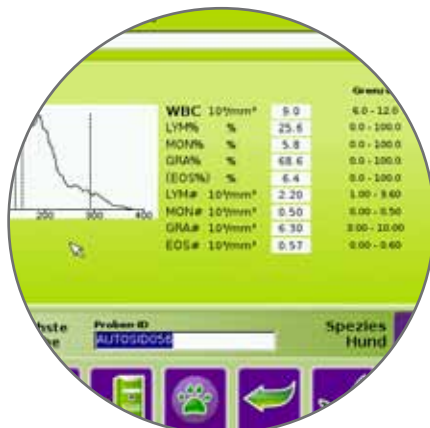

3.

AbleSEN der Ergebnisse

- Ergebnisse innerhalb von 60 Sekunden
- umfangreiche interne Qualitätskontrolle
- Ergebnisanzeige im Display
- automatischer Ausdruck und Übertragung in die Praxisverwaltungssoftware

scil Vet abc Plus⁺

Technische Daten und Spezifikationen

Messprinzipien

Tierarten:	Hund, Katze, Pferd, Kaninchen, Maus, Ratte, Schaf, Schwein
Parameter:	WBC, RBC, PLT, HCT, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV außerdem bei Hunden, Katzen und Pferden: Granulozyten (# und %), Lymphozyten (# und %), Monozyten (# und %) und eosinophile Granulozyten (# und %)
Einheiten:	konventionell oder SI
Messdauer:	60 Sekunden
Probenvolumen:	10 µl EDTA-Vollblut
Messprinzip:	Impedanzmessung für WBC, RBC, PLT und Spektralphotometrie für HGB
Bedienung:	intuitive Benutzerführung über 12"-Touchscreen
Reagenzien:	geschlossenes Reagenzienpacksystem inkl. Diluent, Lyse, Reiniger und Abfallkammer

Datenmanagement

Interner Datenspeicher:	1.000 Ergebnisse
Ergebnisausgabe:	Anzeige auf Touchscreen, Ausdruck, Datenübertragung in alle gängigen Praxisverwaltungsprogramme
Schnittstellen:	RS232, Ethernet

Vertrieb durch:



scil animal care company GmbH
Dina-Weissmann-Allee 6
D-68519 Viernheim
Tel.: +49 (0) 6204 78 90 - 0
Fax: +49 (0) 6204 78 90 - 200
info-de@scilvet.com
www.scilvet.com