

Kurzbedienungsanleitung Vet/IV Infusionspumpe

➤ **Infusionsschlauch einlegen:**

Die vordere Klappe durch Tastendruck herunterklappen und den Schlauch in die Vertiefungen einlegen, die Flußrichtung wird durch die Pfeiltasten angegeben

➤ **Infusionsschlauch spülen:**

Nach dem Einlegen des Infusionsschlauchs die Pumpe einschalten und danach PRIME drücken.

➤ **Arbeiten im Makromodus:**

Rate: 1-999 ml/h, maximales Volumen: 9999ml.

Infusionsrate und Zeit definieren:

Eingabe der Infusionsrate über Pfeiltasten, Select drücken, Zeit mit Pfeiltasten eingeben, VI auf null setzen, VTBI wird berechnet, Infusionsschlauch ans Tier anschließen, dann mit Run/Hold Infusion starten.

Infusionsrate und VTBI definieren:

Eingabe der Infusionsrate über Pfeiltasten, Select drücken, VTBI mit Pfeiltasten eingeben, VI auf null setzen, Zeit wird berechnet, Infusionsschlauch ans Tier anschließen, dann mit Run/Hold Infusion starten,.

Start und Stop der Infusion über Run/Hold – Taste

Select –Taste während der Infusion bedienen:

1 x drücken: verbleibende Infusionszeit wird angezeigt

2 x drücken: VTBI wird angezeigt

3 x drücken: VI wird angezeigt.

Zwischenzeitliches Ändern der Infusionsrate:

Run/Hold – Taste drücken, mit Select – Taste Rate anwählen, mit Pfeiltasten neue Infusionsgeschwindigkeit eingeben, mit Run/Hold – Taste Infusion starten.

Lautstärke des Alarmtons verändern:

Select im eingeschalteten Zustand zwei Sekunden drücken, „TONE“ erscheint im Display, mit Pfeiltasten Lautstärke zwischen Stufe 1 und 7 einstellen.

➤ **Arbeiten im Micromodus:**

Micro: Rate: 0,1-99,9ml/h, maximales Volumen: 2500ml

Ansonsten siehe Macromodus.

➤ **Auswählen eines Infusionsprogramms:**

Bei gedrückter Select - Taste On - Taste drücken. Mit Select das gewünschte Programm, z.B. Macro, rechts neben dem Display auswählen. Mit Run/Hold bestätigen, mit Select Druck auswählen, mit Run/Hold bestätigen, danach Eingabe der Kriterien Infusionsrate, Zeit und VTBI je nach Programm.

Kurzbedienungsanleitung Vet/IV Infusionspumpe

➤ **Spezialprogramme:**

10-P (Multiprogrammodus)

Definition von bis zu 10 Infusionsprogrammen, die nacheinander automatisch durchgeführt werden, Rate und VTBI für jedes Programm definieren.

TPN-Programm

Infusionsprogramme mit einer Anflutungs- und Abflutungsphase.

TPN EASY-Programm

Siehe TPN-Programm, wobei Anflutungs- und Abflutungsphase eine Stunde beträgt.